

MODE D'EMPLOI

identifiant du prélèvement



Dispositif de Prélèvement Autonome (DPA)

Contenu du Kit

- Un sachet de lingettes désinfectantes (non alcoolisées)
- Un sachet de 2 compresses
- 2 micro-lancettes (une devrait suffire)
- Le Dispositif de Prélèvement DPA
- Les documents à compléter
- Les sachets d'emballage
- L'enveloppe de retour préaffranchie



Le Dispositif de Prélèvement Autonome (DPA) est un dispositif médical de classe I à usage unique, destiné à recueillir et à stocker un échantillon sanguin.



Comment procéder

Vous allez recueillir une goutte de sang qui sera absorbée par le dispositif DPA, en faisant une minuscule incision avec une micro-lancette.

Vous devez désinfecter la région qui sera prélevée avec la lingette, et l'essuyer avec la compresse sèche.

La goutte de sang apparaît spontanément. A défaut, il est nécessaire de presser le doigt pour la faire apparaître.

Toute l'extrémité du DPA doit être rouge. Si nécessaire pressez à nouveau le doigt pour que la quantité soit suffisante.

Merci d'utiliser uniquement les éléments fournis.

Le kit DPA est personnel, ne le partagez pas.

Le retour du prélèvement s'effectue par la poste.

Retrouvez les indications sur notre site internet.

Nous sommes là pour vous accompagner, à chaque étape.


www.lasantemesure.fr

Vous avez des questions ?
Contactez-nous dès maintenant
+33 1 42 22 20 00
peth@lasantemesure.fr

La Santé se Mesure, SAS
93, rue de Seine - 75006 Paris
RCS Paris 790 896 641
www.lasantemesure.fr

LA SANTÉ
SE MESURE

Précautions à suivre

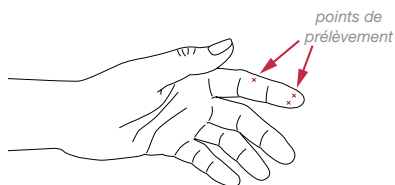

Choisissez une région où la peau est plus fine, le côté de l'extrémité du doigt. Si vous exercez une activité manuelle, le côté du milieu du doigt. L'index le plus souvent.



Prélèvement
insuffisant



Prélèvement
correct



Prélèvement
trop important


L'objectif est de recueillir une goutte de sang de 10 microlitres. Soit une goutte d'approximativement 3 mm. Pour cela, on va faire une minuscule incision avec une micro-lancette.




Retirez le bouchon de la lancette (en tournant)




Appliquez l'auto-piqueur sur le côté du bout du doigt, fermement. La lancette se déclenche automatiquement

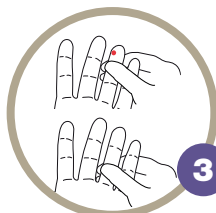


Si nécessaire, pressez le doigt pour obtenir une goutte de sang d'environ 3 millimètres.

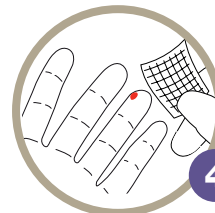


Essayez tout de suite la première trace de sang avec la compresse.

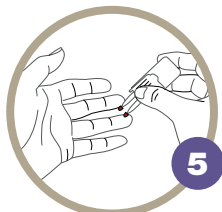

Approchez le dispositif (DPA) par-dessus, posez-le sur la goutte. Dès que la totalité de l'ogive blanche est devenue rouge, retirez le DPA. Si ce n'est pas le cas, pressez le doigt pour obtenir une nouvelle goutte de sang.

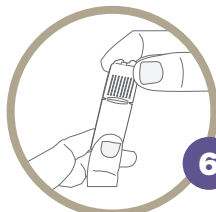

Refermez l'étui de prélèvement.

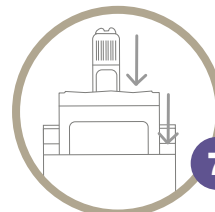

Placez l'étui dans la poche en plastique, avec le sachet de silicate. Remettez aussi les auto-piqueurs dans l'enveloppe, nous nous occupons du recyclage. Placez le sachet, la carte de renseignements dans l'enveloppe de retour préaffranchie.